Guide de démarrage rapide



AeroPro^{MD}

Pièce à main de prophylaxie sans fil

À lire attentivement. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître tous les détails du produit.



Le Guide rapide en français peut être consulté en ligne à l'adresse premierdentalco.com



Pour commencer

Première utilisation: suivez les étapes 1 à 3.



Utilisation régulière : suivez les étapes 4 à 7.



- A Boîtier du moteur
- B Gaine externe autoclavable
- **C** Support
- Poste de recharge

- Adaptateur c.a.
- **F** Barrières jetables AeroPro™
- Joints toriques de rechange et outil d'entretien



Première utilisation





L'AeroPro™ est livré en position verrouillée. Il faut le déverrouiller avant la première utilisation.

Retirez l'étiquette verte « Unit is Locked » (appareil verrouillé) du boîtier du moteur (A)



Placez la gaine externe (B) sur le boîtier du moteur (A)







Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyez sur le bouton ON/OFF/ MODE (marche/arrêt/mode) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.




Écouter et regarder

L'AeroPro émettra six bips et tous les voyants clignoteront simultanément à six reprises, ce qui indique que le système est déverrouillé.



Consultez la bibliothèque en ligne de tutoriels vidéo utiles sur le site premierdentalco.com

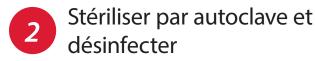





Placez la gaine externe (B) et le support (C) ensachés dans un autoclave à vapeur conformément aux instructions du fabricant de l'autoclave.





NE stérilisez PAS le boîtier du moteur (A) à l'autoclave. 🦠





Cycle complet: 10 minutes

Stérilisation à vapeur par gravité Gaine externe et support

Cycle complet: 135 °C (275 °F) pendant 10 minutes



Cycle complet: 4 minutes

Stérilisation à vapeur à vide partiel de la gaine externe et du support

Cycle complet: 132 °C (270 °F) pendant 4 minutes

Cycle de séchage :

Pour sécher, utilisez le cycle de séchage de l'autoclave à vapeur. Réglez la durée du cycle pour 20 à 30 minutes. Ne dépassez pas 137 °C (278 °F).



NE PAS DÉPASSER 137 °C (278 °F)

Pour les composants non autoclavables

Le boîtier du moteur (A), le poste de recharge (D) et l'adaptateur c.a. (E) ne sont pas autoclavables. Utilisez uniquement un désinfectant à base d'eau sans immersion de catégorie intermédiaire selon les CDC (c.-à-d. des lingettes de désinfectant au chlore avec mention tuberculocide).



Première recharge de l'AeroPro™:

Branchez l'adaptateur c.a. (E) dans un parasurtenseur (alimentation 100-240 V seulement).



Insérez le connecteur à l'arrière du poste de recharge (D). Logez le boîtier du moteur (A) sur le poste de recharge.



Les voyants s'illumineront en rafale pour confirmer le lancement de la recharge.



La recharge complète dure deux heures.







L'AeroPro est doté de la technologie ChargeSMART^{MC} conçue pour optimiser la durée de vie de la batterie afin que vous n'ayez pas à vous préoccuper de vous retrouver avec une batterie à plat pendant la journée de travail.

Reportez-vous à la section 4.6 du mode d'emploi ou découvrezen davantage à ce sujet sur le site premierdentalco.com

Pour connaître les instructions d'utilisation de l'AeroPro, reportez-vous à l'étape 4 au verso.

Utilisation régulière



Vérifications avant l'utilisation et assemblage de la pièce à main

Insérez le boîtier du moteur (A) chargé dans une barrière jetable adaptée sur mesure AeroPro^{MD} (F). Assurez-vous que la section avant du boîtier du moteur (A) est parfaitement alignée avec l'ouverture de la barrière jetable.*





Boîtier du moteur (A) inséré dans la barrière jetable AeroPro^{MD} (F).

Placez la gaine externe (B) stérilisée à l'autoclave sur le boîtier du moteur (A) après avoir couvert celui-ci d'une barrière jetable (F).



Fixez un contre-angle de prophylaxie 2pro^{MD} ou un contre-angle de prophylaxie jetable équivalent dans le cône avant de la gaine externe (B).





Illustré – pièce à main entièrement assemblée conforme aux directives des CDC


^{*}Utilisez uniquement les barrières jetables AeroPro^{MD} (F) pour assurer la conformité aux directives des CDC



Utilisation de la pièce à main AeroPro™

Pour mettre l'appareil en marche :

Une fois assemblé : Appuyez rapidement et une seule fois sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) avec le pouce ou l'index. La pointe du contre-angle de prophylaxie jetable commencera à tourner à un bas régime de 500 tr/min.

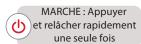

Utilisez la basse vitesse pour tremper le contre-angle de prophylaxie jetable dans la pâte à prophylaxie. Enfoncez la cupule du contre-angle de prophylaxie jetable dans la pâte à prophylaxie en exerçant une force descendante et une pression légère. La basse vitesse peut également servir sur les taches très légères et les patients en pédodontie.

Insérez l'AeroPro^{MD} dans la bouche du patient et, si vous le souhaitez, passez à la haute vitesse (2 800 tr/min). Pour ce faire, appuyez rapidement et une seule fois sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) et relâchez-le, puis commencez le polissage.



<u>Pour arrêter la pièce à main :</u> Appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) pendant une seconde, puis relâchez-le.

<u>Remarque</u>: la pièce à main passe toujours à la basse vitesse quand elle est mise en marche depuis l'arrêt.





Après une période continue de 20 secondes sans utiliser l'appareil AeroPro™, celui-ci s'arrête automatiquement, il passe en mode veille et les voyants s'éteignent. Les voyants s'illuminent à nouveau quand vous appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode).



L'AeroPro™ s'arrête automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue. Appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/ arrêt/mode) pour le redémarrer. Tirez le contre-angle de prophylaxie jetable en ligne droite pour le retirer et le jeter.



Démontez la pièce à main et suivez les procédures de prévention des infections. (Reportez-vous à la section 4.8 du mode d'emploi)



Retirez la gaine externe (B) pour la stériliser en autoclave à vapeur. Reportez-vous à 2 Autoclave.

Stérilisez le support AeroPro^{MD} (C) à l'autoclave si vous l'avez utilisé.



Retirez la barrière jetable AeroPro (F) du boîtier du moteur (A) et jetez-la.



Nettoyez et désinfectez le boîtier du moteur (A), le poste de recharge (D) et l'adaptateur c.a. (E) à l'aide d'un désinfectant de niveau intermédiaire comme indiqué par les CDC. Reportez-vous à l'étape ②. (Reportez-vous à la section 4.8.2 du mode d'emploi pour connaître les instructions de désinfection)




Lors du nettoyage et de la désinfection du boîtier du moteur, évitez de faire pénétrer trop d'humidité autour de la bande verte et à l'intérieur de la partie active du boîtier du moteur.



Placez le boîtier du moteur (A) désinfecté dans le poste de recharge (D). Reportez-vous à 3 Recharge.

Changement des modes de vitesse

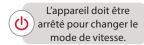

Réglage d'usine: Mode deux vitesses (basse et haute vitesse).

 $(B \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow H)$

Si vous préférez une plus grande plage de vitesses, vous pouvez sélectionner le mode trois vitesses à l'aide des instructions ci-dessous.

3 vitesses

3 bips



Pour changer le mode de vitesse de deux vitesses à trois vitesses, appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/ arrêt/mode) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Trois voyants verts clignoteront et un bip retentira à trois reprises. AeroPro^{MD} a passé en mode trois vitesses.

2 vitesses

2 bips



Pour changer le mode de vitesse de trois vitesses à deux vitesses, appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) et maintenezle enfoncé pendant trois secondes. Les deux voyants verts du haut clignoteront et un bip retentira à deux reprises. AeroPro^{MD} a passé en mode deux vitesses.

Vitesses de fonctionnement	Mode deux vitesses (réglage d'usine)	Mode trois vitesses
Basse	500 tr/min	500 tr/min
Moyenne	_	1 500 tr/min
Haute	2 800 tr/min	2 800 tr/min

Lors du fonctionnement en mode trois vitesses, appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) et relâchez-le rapidement pour changer les vitesses.



 $(B \rightarrow M \rightarrow H \rightarrow B)$

Le mode de vitesse sélectionné est enregistré jusqu'à ce qu'une nouvelle sélection soit faite. (Reportez-vous à la section 4.5 du mode d'emploi.)

Ensemble de base No 5500500

Ensemble complet No 5500510

1 boîtier du moteur 1 boîtier du moteur

1 gaine externe autoclavable 3 gaines externes autoclavables

1 poste de recharge 1 poste de recharge

1 adaptateur c.a. 1 adaptateur c.a.

1 support 1 support

1 boîte de 500 barrières jetables 1 boîte de 500 barrières jetables

3 ensembles supplémentaires de joints toriques et outil d'entretien joints toriques et outil d'entretien

(6 petits joints toriques pour la gaine externe et 3 grands joints toriques pour le boîtier du moteur) 3 grands joints toriques pour le boîtier du moteur)

Accessoires*

5500520	Gaine externe autoclavable AeroPro ^{MD} – unité
5500530	Barrières jetables AeroPro ^{MD} – boîte de 500
5500550	Boîtier du moteur AeroPro ^{MD}
5500540	Poste de recharge AeroPro ^{MD}
5500541	Adaptateur c.a. AeroPro™
5500560	Support AeroPro ^{MD}
5500561	Joints toriques de rechange AeroPro™

^{*}Commandez auprès de votre détaillant autorisé.

Enregistrement de la garantie

Veuillez enregistrer votre système de prophylaxie sans fil AeroPro et conserver votre facture du détaillant. Ces mesures rendront possible la prestation d'un service rapide et efficace si votre système de prophylaxie sans fils AeroPro doit faire l'objet d'une évaluation, d'une réparation ou d'un remplacement pendant la période de garantie, et elles permettront à Premier de vous transmettre des renseignements importants sur le produit.

Enregistrez-la en ligne sur le site : premierdentalco.com/aeroprowarrantyregistration





Fabricant

Premier® Dental Products Company • 1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, USA Téléphone 888-670-6100 • 610-239-6000 • Télécopieur 610-239-6171 premierdentalco.com • info@premierdentalco.com

Fabriqué en RPC Mode d'emploi no 55506F