

Enamel Pro®

Prophylaktische Paste für den professionellen Einsatz



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30173 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

IFU# 90076 0421081 Rev5 PDF

Vorgesehene Verwendung:

Zur Verwendung als vorbeugende Behandlung. Dient zum Polieren und Reinigen der Zähne mit Siliziumdioxidpartikeln unterschiedlicher Körnung als Schleifmittel, während es gleichzeitig amorphes Kalziumphosphat (ACP) bereitstellt, um die Fluoridaufnahme während des Verfahrens zu erhöhen und die Remineralisierung der Zähne zu stimulieren. In Verpackungen, auf denen angegeben ist, dass Enamel Pro Fluorid enthält, ist es in einer Konzentration von 1,23 % Fluoridionen enthalten.

Anwendungsbereiche:

Indiziert für normative präventive Zahnbehandlungen zur Fleckenentfernung und Politur

Erhältlich in den folgenden Körnungen:

Fein	Für sanftes Polieren, ideal für jüngere Patienten.
Mittel	Für normale Reinigungsvorgänge bei Erwachsenen, bei denen ein hohes Maß an Politur und Fleckenentfernung gewünscht ist.
Grob	Für erwachsene Patienten mit erheblicher Fleckenbildung.
Extra grob	Für Patienten mit besonders schwer zu entfernenden Verfärbungen.

Produktbeschreibung:

Die Produktlinie umfasst professionelle Prophylaxepasten zur Zahnreinigung und -politur, die amorphes Kalziumphosphat zur Erhöhung der Fluoridaufnahme enthalten und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Optional auch als fluoridfreie Produkte erhältlich.

Kontraindikationen:

Unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden –

- Wenn beim Patient eine Fluoridüberempfindlichkeit vorliegt oder in der Vergangenheit vorlag, da das Produkt Fluorid enthält.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Das Produkt in der Originalverpackung und unter den auf dem Etikett angegebenen Lagerbedingungen aufbewahren.
- Nur für den Gebrauch an einem einzigen Patienten. Nicht wiederverwenden.
- Nur auf ärztliche Verschreibung verwenden, verschreibungspflichtiges Produkt.

WARNHINWEISE:

- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken: Einnahme von Fluorid kann Übelkeit verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Verursacht Hautreizungen.

Nebenwirkungen:

- Beim Verschlucken von Pasten können Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Unter www.premierdentalco.com finden Sie eine vollständige Liste der Geschmacksrichtungen und Angebote.

Materialien:

In Verpackungen, auf denen angegeben ist, dass Enamel Pro Fluorid enthält, ist dieses in einer Konzentration von 1,23 % Fluoridionen enthalten. Erhältlich auch als fluoridfreies Produkt. Enamel Pro enthält Bimsstein, die Abrasivität des Bimssteins variiert mit der Körnung.

Gebrauchsanweisung:

1. Einheitsdosiskelche – Jeder Kelch enthält genügend Enamel Pro Paste für eine (1) Prophylaxebehandlung.
2. Jede Kombination aus handelsüblichen Prophylaxe-Winkelstücken und Gummikelchen kann verwendet werden.
3. Füllen Sie den Kelch, indem Sie die Stirnseite des Kelches in die Paste drücken, während Sie das Winkelstück bei niedriger Drehzahl laufen lassen. Das „Swirl“-Design dient nur ästhetischen Zwecken. Alle Inhaltsstoffe des Kelches bieten die gleichen Vorteile für die Zähne Ihrer Patienten.
4. Während des gesamten Vorgangs sollte ausreichend Paste auf dem Kelch verbleiben, um eine Überhitzung der Zahnoberfläche zu vermeiden.
5. Es wird empfohlen, den Speichel abzusaugen, um eine übermäßige Verdünnung und ein Verschlucken der Paste zu vermeiden.
6. Sollte sich die Paste als für Ihre Zwecke zu trocken erweisen, fügen Sie einfach ein oder zwei Tropfen Wasser hinzu, um sie weicher zu machen.

Lagerung:

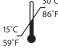








Bei Temperaturen zwischen 15 °C (59 °F) und 30 °C (86 °F) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Haltbarkeit:

Die Haltbarkeitsdauer des Produkts beträgt zwei (2) Jahre ab dem Herstellungsdatum und ist auf dem Produkt angegeben.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Temperaturgrenzwerte
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	REF
	Nicht wiederverwenden
	Reizend
	Hersteller
	Medizinprodukt
	Nur für den professionellen Gebrauch
	UKCA