

Ziroxide™

Prophylaktische Paste für den professionellen Einsatz



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com



premierdentalco.com/promise

IFU# 90075 0421083 Rev4 PDF

Vorgesehene Verwendung:

Zur Verwendung als vorbeugende Behandlung. Das Produkt ist zur Tiefenentfernung von Flecken und zum Polieren vorgesehen und enthält grobkörnige Partikel aus Zirkonsilicat. In Verpackungen, auf denen angegeben ist, dass Ziroxide Fluorid enthält, ist dieses in einer Konzentration von 1,23 % Fluoridionen enthalten.

Anwendungsbereiche:

Indiziert zur vorbeugenden Zahnbehandlung zur Entfernung von hartnäckigeren Verschmutzungen mit größeren Körnungen und zum Polieren der Zähne.

Erhältlich in den folgenden Körnungen:

Mittel/fein	Für normale Reinigungsvorgänge bei Erwachsenen, bei denen ein hohes Maß an Politur und Fleckenentfernung gewünscht ist.
Grob	Für erwachsene Patienten mit erheblicher, schwer zu entfernender Fleckenbildung.

Produktbeschreibung:

Die Produktlinie umfasst zirkonsilicat- und fluoridhaltige professionelle Prophylaxepasten zur Politur und Tiefenentfernung von Flecken, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Optional auch als fluoridfreie Produkte erhältlich.

Kontraindikationen:

Unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden –

- Wenn beim Patient eine Fluoridüberempfindlichkeit vorliegt oder in der Vergangenheit vorlag, da das Produkt Fluorid enthält.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Das Produkt in der Originalverpackung und unter den auf dem Etikett angegebenen Lagerbedingungen aufbewahren.
- Nur für den Gebrauch an einem einzigen Patienten. Nicht wiederverwenden.
- Nur auf ärztliche Verschreibung, verschreibungspflichtiges Produkt.

WARNHINWEISE:

- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken: Einnahme von Fluorid kann Übelkeit verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Verursacht Hautreizungen.

Nebenwirkungen:

- Beim Verschlucken von Pasten können Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Erhältlich mit natürlichem Minzegeschmack.

Materialien:

In Verpackungen, auf denen angegeben ist, dass Ziroxide Fluorid enthält, ist dieses in einer Konzentration von 1,23 % Fluoridionen enthalten. Fluoridfreie Produkte enthalten Zirkonsilicat. Alle Ziroxide-Produkte enthalten Zirkonsilicat in unterschiedlicher Körnung als Schleifmaterial. Die Abrasivität von Zirkonsilicat variiert mit der Körnung.

Gebrauchsanweisung:

1. Ein-Dosiskelche – Jeder Kelch enthält genügend Ziroxide Paste für eine (1) Prophylaxebehandlung.
2. Vorratspackung – Entnehmen Sie ausreichend Paste für eine Behandlung und geben Sie diese in ein sauberes Dappenglas oder einen anderen geeigneten Behälter.
3. Jede Kombination aus handelsüblichen Prophylaxe-Winkelstücken und Gummikelchen kann verwendet werden.
4. Füllen Sie den Kelch, indem Sie die Stirnseite des Kelches in die Paste drücken, während Sie das Winkelstück bei niedriger Drehzahl laufen lassen. Alle Inhaltsstoffe des Kelches bieten die gleichen Vorteile für die Zähne Ihrer Patienten.
5. Während des gesamten Vorgangs sollte ausreichend Paste auf dem Kelch verbleiben, um eine Überhitzung der Zahnoberfläche zu vermeiden.
6. Es wird empfohlen, den Speichel abzusaugen, um eine übermäßige Verdünnung und ein Verschlucken der Paste zu vermeiden.
7. Sollte sich die Paste als für Ihre Zwecke zu trocken erweisen, fügen Sie einfach ein oder zwei Tropfen Wasser hinzu, um sie weicher zu machen.

Lagerung:









Bei Temperaturen zwischen 15 °C (59 °F) und 30 °C (86 °F) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Haltbarkeit:

Die Haltbarkeitsdauer des Produkts beträgt zwei (2) Jahre ab dem Herstellungsdatum und ist auf dem Produkt angegeben.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Temperaturgrenzwerte
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	REF.
	Nicht wiederverwenden
	Reizend
	Hersteller
	Medizinprodukt
Rx ONLY	Nur für den professionellen Gebrauch
	UKCA