

# Ziroxide™

Pasta de profilaxis profesional



**premier®** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Fabricante:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive,  
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.  
888-670-6100 • 610-239-6000  
[premierdentalco.com](http://premierdentalco.com)



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

IFU# 90074 0421082 Rev7 PDF

**Uso previsto:**

Debe utilizarse como tratamiento preventivo. Está pensado para utilizarse como un agente de eliminación de manchas profundas y de pulido, que contiene partículas de grano grande de silicato de circonio. En los envases que indican que Ziroxide contiene flúor, este está presente en una concentración de 1,23 % de iones de flúor.

**Indicaciones de uso:**

Indicado como tratamiento dental preventivo para eliminar las manchas más difíciles con tamaños de grano más grandes y para pulir los dientes.

**Disponible en los siguientes granos:**

<b>Medio/fino</b>	Para procedimientos normales de limpieza de adultos en los que se desea un alto nivel de pulido y eliminación de placa.
<b>Grueso</b>	Para pacientes adultos con una importante acumulación de manchas difíciles de eliminar.

**Descripción del producto:**

Línea de productos de pasta para profilaxis profesional para el pulido y la eliminación de manchas profundas que contiene silicato de circonio y que se ofrece en una amplia variedad de sabores. Hay formulaciones sin flúor opcionales.

**Contraindicaciones:****No lo utilice en las siguientes condiciones:**

- El producto contiene flúor, si el paciente muestra o tiene un historial de sensibilidad al flúor.

**PRECAUCIONES:**

- Mantenga el producto almacenado en su envase original y en las condiciones de almacenamiento indicadas en el etiquetado.
- Solo para uso de un solo paciente. No se debe reutilizar.
- Solo con receta, dispositivo de venta con receta.

**ADVERTENCIAS:**

- Nocivo en caso de ingestión. La ingestión de flúor puede provocar náuseas.
- Provoca irritación ocular grave.
- Provoca irritación cutánea.

**Reacciones adversas:**

- Pueden producirse náuseas y vómitos por la ingestión de pastas.

Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

**Contenido y disposición:**

Disponible en sabor a menta natural.

**Materiales:**

En los envases que indican que Ziroxide contiene flúor, este está presente en una concentración de 1,23 % de iones de flúor. Las formulaciones sin flúor contendrán silicato de circonio. Todos los Ziroxide contienen piedra pómez de diferente grado como material abrasivo. La abrasividad de la piedra pómez varía según el grano.

**Indicaciones de uso:**

1. Copas de dosis unitarias - Cada copa contiene suficiente Ziroxide Paste para un (1) procedimiento de profilaxis.
2. Envase a granel - Retire la pasta suficiente para un procedimiento y colóquela en un vaso Dappen limpio u otro recipiente adecuado.
3. Utilice cualquier combinación comercial de ángulo de profilaxis - copa de goma.
4. Llene la copa presionando la cara de la copa en la pasta mientras hace funcionar el ángulo a baja velocidad. Todo el contenido de la copa proporcionará los mismos beneficios a los dientes de su paciente.
5. Durante todo el procedimiento, debe mantenerse suficiente pasta en la copa para evitar el sobrecalentamiento de la superficie del diente.
6. Se recomienda la evacuación de la saliva para evitar el exceso de dilución y la ingestión de la pasta.
7. Si la pasta le parece demasiado seca para su gusto, solo tiene que añadir una o dos gotas de agua para ablandarla.

**Almacenamiento:**









Almacene en condiciones de temperatura de 15 °C a 30 °C y lejos de la luz solar directa.

**Duración:**

La duración del producto es de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación que se indica en el producto.

**Para más información:**

Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) o llame a Premier al 610-239-6000.

Símbolos	Significado del símbolo
	Límite de temperatura
	Advertencia; consulte las instrucciones de uso
	SKU
	No reutilizar
	Irritante
	Fabricante
	Producto sanitario
<b>Rx ONLY</b>	Para uso profesional solamente
	UKCA