

Knit-Pak+™

Imprägnierter Strickfaden



premier® Inspired solutions for daily dentistry®

Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com
Hergestellt in Korea



premierdentalco.com/promise

Vorgesehene Verwendung:

Knit-Pak+ ist ein verschreibungspflichtiger, mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat imprägnierter Faden und wird für die vorübergehende chemo-mechanische Retraktion von Gingivagewebe und die Hämostase des Gingivasaums um den Zahn verwendet. Er ist für präzise und verbesserte Ergebnisse bei der Anfertigung von dentalen Abformungen, bei der Kavitätenpräparation und bei allen Anwendungen vorgesehen, bei denen Hämostase und Retraktion erforderlich sind.

Produktbeschreibung:

Premier® Knit-Pak+ ist ein mit Aluminiumchlorid imprägnierter Gingiva-Retraktionsfaden aus gestrickten Mikrofasern für die vorübergehende chemo-mechanische Retraktion von Gingivagewebe und die Hämostase des Gingivasaums um den Zahn.

Inhalt:

Art.-Nr.	Produktspezifikationen
9007560	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Dunkelgrün • Größe – 000.0 • Länge – 254 cm (100 Zoll)
9007561	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Grün • Größe – 000 • Länge – 254 cm (100 Zoll)
9007562	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Braun • Größe – 00 • Länge – 254 cm (100 Zoll)
9007563	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Violett • Größe – 0 • Länge – 254 cm (100 Zoll)
9007564	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Blau • Größe – 1 • Länge – 254 cm (100 Zoll)
9007565	Knit-Pak+ Imprägnierter Strickfaden – Standard Pack • Farbe – Orange • Größe – 2 • Länge – 254 cm (100 Zoll)

Kontraindikationen:

- Knit-Pak+ unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:
- Bei Patienten mit signifikanter Parodontalerkrankung oder Furkationsbeteiligung.
 - Infektion innerhalb des Zahnfleisches wegen Wiederverwendung von Fäden.
 - Intraorale Stelle mit aktiver Infektion oder Entzündung

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Den behandelten Bereich vor der Abformung unbedingt abspülen, um eine Hemmung der Polymerisation des Abformmaterials zu vermeiden.
- Die Wiederverwendung eines Einwegprodukts kann Patienten und Personal einer Kreuzkontamination aussetzen.
- Achtung: Laut Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Arzt/Zahnarzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

WARNHINWEISE:

- Keine übermäßige Kraft anwenden und dadurch die biologische Breite verletzen, wenn der Retraktionsfaden in den Sulkus gestopft wird.
- Den Faden nicht länger als 20 Minuten im Zahnfleisch belassen, da dies zu einer anhaltenden Rezession des Zahnfleisches führen kann.
- Vor der zahnärztlichen Abformung sicherstellen, dass das gesamte Aluminiumchlorid durch Abspülen entfernt wird, um eine Hemmung der Polymerisation des Abformmaterials zu vermeiden.
- Den Faden nicht wiederverwenden. Fäden sind Einwegprodukte.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Aluminiumchlorid verwenden.
- Aluminiumchlorid reizt Haut und Augen.

Nebenwirkungen:

- Zu den möglichen Nebenwirkungen können u. a. gehören:
- Rezession des Zahnfleisches wegen verlängerter Verwendung oder übermäßiger Kraftanwendung im Sulkus
 - Es können zusätzliche Verfahren notwendig sein, wenn die Aushärtung des Abformmaterials durch Aluminiumchlorid-Rückstände beeinträchtigt wurde.
 - Reaktionen allergischer Art wie etwa Schwellung, Entzündung, Reizung und Schmerzen können bei Personen mit bekannter Allergie gegen Aluminiumchlorid auftreten.

Materialien:

NP konjugiertes Garn (Nylon-6, PET), imprägniert mit Aluminiumchlorid.

Gebrauchsanweisung:

1. Beurteilen Sie die Gesundheit der Gingiva und die Tiefe des Sulkus.

2. Wählen Sie den imprägnierten Faden der geeigneten Größe und schneiden Sie ihn durch Schließen der Kappe auf die erforderliche Länge zurecht (eine Keramik Klinge in der Kappe durchtrennt den Faden)
3. Den Faden eng an den Zahnhals anlegen und mit einem Fadenstopf-Handinstrument vorsichtig in den Sulkus einbringen.
4. Die Fäden in situ belassen und eine (1) bis drei (3) Minuten warten.
5. Vor dem Entfernen des Fadens sollte er mit Wasser befeuchtet/abgespült werden, damit er beim Entfernen kein Gingivagewebe mitnimmt und einreißt, was zu weiterer Blutung führt.
6. Faden entfernen; den Bereich mit kräftigem Luft-Wasser-Spray spülen, um das Aluminiumchlorid vollständig zu entfernen, und die Präparation trocknen.
7. Die Behandlungsstelle untersuchen, um die Blutstillung zu bestätigen.
8. Wenn die Blutung nach Entfernen des Fadens persistiert, das Verfahren von Schritt 2 bis 7 wiederholen, bis eine Blutstillung erreicht ist.

Lagerung:

Das Produkt vor der ersten und allen weiteren Verwendungen stets in seiner Original-Schutzverpackung lagern.
 An einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 10 °C/50 °F und 28 °C/82,4 °F lagern.

Haltbarkeit:

- Die Haltbarkeit von Knit-Pak+ beträgt 3 Jahre (36 Monate) ab Herstellungsdatum.
- Nicht verwenden, wenn das Produkt abgelaufen ist. Siehe Haltbarkeitsdatum auf dem Produktetikett.

Für weitere Informationen:

Das SDB erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch unter +1-610-239-6000

Symbole	Symbolbedeutung
	Haltbarkeitsdatum
	Hersteller
	Chargennummer
	Reizend
	Die oberen und unteren Temperaturgrenzwerte bei Verwendung, Lagerung und Transport
	Nicht wiederverwenden
	Achtung: Siehe Gebrauchsanweisung
Rx ONLY	ACHTUNG: Nach US-Bundesrecht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden
	Siehe Gebrauchsanweisung auf www.premierdentalco.com