



Brite Shield™

Instrumentenreiniger und Instrumentenschutz



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000

premierdentalco.com · Hergestellt in den USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

IFU# 91110-2 0421093 Rev5 PDF

Vorgesehene Verwendung:

Brite Shield™ ist ein statischer Einweich- und Ultraschallreiniger, der verstopfte Dentalinstrumente chemisch-mechanisch debridiert und durch einen speziellen Passivierungsprozess Rost und Korrosion der Instrumente hemmt.

Produktbeschreibung:

Premier® Brite Shield™

Starke enzymatische Reinigungswirkung zur Entfernung von Proteinen, leichten Verschmutzungen, festsitzenden Zementen und zum Schutz der Instrumente vor Rost und Korrosion.

Kontraindikationen:

Brite Shield™ unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:

- Behälter oder Deckel zerbrochen oder beschädigt.
- Nicht für Instrumente aus eloxiertem Aluminium verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Fremdstoffen mischen.
- Überverdünnung vermeiden.
- Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Behälter bei Nichtbenutzung fest verschlossen halten.
- Keinen nassen Dosierlöffel in Behälter platzieren.
- Exponierte Haut und Hände nach Anwendung gründlich waschen.

WARNHINWEISE:

- Bei Exposition Kontaktlinsen herausnehmen.
- AUGEN – bei Exposition 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- HAUT – Mit reichlich Wasser spülen.
- VERSCHLUCKEN – Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Unerwünschte Ereignisse:

- BEI VERSCHLUCKEN –
 - »Schädlich, kann Übelkeit und Erbrechen verursachen.
 - »Kann Reizungen im Mund- und Rachenraum verursachen.
- Kann Hautreizungen, Augenschäden und allergische Hautreaktionen verursachen.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Art.-Nr.	Produktspezifikationen
9011996	Brite Shield PROBE (1 Pkg.)
9011997	Brite Shield 10er-Packung
9011100	Brite Shield (6er-KARTON)
8101100	Brite Shield (Einzelpackung)
9011911	Brite Shield Probe INTL mit Abbildungskarte

Materialien:

Umweltfreundliche leistungsstarke Enzymkombination.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Zur täglichen Reinigung und zum Schutz vor Rost einen Messlöffel Brite Shield-Pulver und 64 Unzen (1,9 l) warmes Wasser in das Ultraschallreinigungsgerät geben.
- Für stark verschmutzte Instrumente zwei Messlöffel des Pulvers verwenden.
- Zum Entfernen von Zement/Flecken zwei Messlöffel Brite Shield-Pulver und 16 Unzen (473 ml) warmes Wasser in das Ultraschallreinigungsgerät geben.
- Umrühren, bis sich das Pulver aufgelöst hat.
- Die Instrumente in die Lösung legen und im Ultraschallreinigungsgerät 1-5 Minuten reinigen.
- Vor dem Sterilisieren die Instrumente gründlich mit Wasser spülen und abtrocknen.
- Zum Erzielen der bestmöglichen Ergebnisse sollte die Lösung nach jeder Verwendung oder täglich gewechselt werden.

Entsorgung:

Nach der Verwendung sollte das Produkt als biogefährlicher medizinischer Abfall entsprechend den Richtlinien/Verfahren der Einrichtung oder Institution entsorgt werden.

Lagerung:








Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit:

Das Produkt hat kein Verfallsdatum.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Hersteller
	Chargennummer
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	Kühl und trocken lagern
	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
	Medizinprodukt
	UKCA