



# Brite Shield™

Nettoyant et protecteur d'instruments



**premier®** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Fabricant :

Premier® Dental Products Company.

1710 Romano Drive,

Plymouth Meeting, PA 19462 É.-U.

888 670-6100 • 610 239-6000

premierdentalco.com • Fabriqué aux États-Unis



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

### Utilisation prévue :

Brite Shield™ est un nettoyant ultrasonique pour trempage statique qui débride de manière chimio-mécanique les instruments dentaires obstrués et aide à protéger les instruments avec un processus de passivation unique qui limite la rouille et la corrosion.

### Description du produit :

Premier® Brite Shield™

Action nettoyante enzymatique puissante pour éliminer les protéines, les taches légères et les ciments durcis; protège les instruments contre la rouille et la corrosion.

### Contre-indications :

Ne pas utiliser Brite Shield™ lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- Si le contenant ou le capuchon est brisé ou endommagé.
- Ne doit pas être utilisé avec des instruments en aluminium anodisé.

### PRÉCAUTIONS :

- Ne pas mélanger le produit avec d'autres détergents ou contaminants.
- Éviter une dilution excessive.
- Conserver le produit dans son contenant original.
- Garder les contenants hermétiquement fermés lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas placer une cuillère humide dans le contenant.
- Laver la peau exposée et les mains soigneusement après la manipulation.

### AVERTISSEMENTS :

- Enlever les lentilles de contact en cas d'exposition.
- YEUX – Rincer à grande eau pendant 15 minutes en cas d'exposition. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- PEAU – Rincer à grande eau.
- INGESTION – Boire beaucoup d'eau. Consulter rapidement un médecin.

### Effets indésirables :

- EN CAS D'INGESTION :
  - » Nocif, peut provoquer des nausées et des vomissements.
  - » Peut être irritant pour la bouche et la gorge.
- Peut causer une irritation de la peau, des lésions oculaires et des réactions allergiques de la peau.

Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le produit a été utilisé.

### Contenu et mise en place :

N° d'article	Spécifications du produit
9011996	Brite Shield, ÉCHANTILLON (1 emballage)
9011997	Brite Shield, emballage de 10
9011100	Brite Shield (CAISSE DE 6)
8101100	Brite Shield (pot unique)
9011911	Brite Shield, échantillon INTL avec carte schématique

### Contenu :

Formule enzymatique puissante et respectueuse de l'environnement.

### MODE D'EMPLOI :

- Pour le nettoyage quotidien et la protection contre la rouille, placer une cuillerée de poudre Brite Shield et 1 894 ml (64 oz liq.) d'eau chaude dans l'unité ultrasonique.
- Pour les instruments fortement contaminés, utiliser deux cuillerées de poudre.
- Pour l'élimination de ciments/taches, placer deux cuillerées de poudre Brite Shield et 473 ml (16 oz liq.) d'eau chaude dans l'unité ultrasonique.
- Mélanger jusqu'à dissolution.
- Immerger les instruments dans la solution et nettoyer dans l'unité ultrasonique pendant une période de 1 à 5 minutes.
- Rincer les instruments à grande eau et assécher avant la stérilisation.
- Pour des résultats optimaux, changer la solution après chaque utilisation ou quotidiennement.

### Élimination :

Après l'utilisation, éliminer la solution en tant que déchet médical biologiquement dangereux, conformément aux lignes directrices ou aux procédures des installations ou de l'institution.

### Entreposage :








Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

### Durée de conservation :

Le produit n'a pas de durée de conservation.

### Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.

Symboles	Signification du symbole
	Fabricant
	Numéro de lot
	Avertissement, voir le mode d'emploi
	Entreposer le produit dans un endroit sec et frais
	Éviter les rayons directs du soleil
	Produit à usage médical
	UKCA