

Pro Clean™

Professioneller hochwirksamer Zahnstein- und Fleckentferner für Vollprothesen, Teilprothesen, Zahnsparren und Beißschiene



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com · Hergestellt in den USA



premierdentalco.com/promise

IFU# 90112-2 0421094 Rev0 PDF

Vorgesehene Verwendung:

Dient als Hilfsmittel zur Entfernung von Zahnstein und Flecken von Vollprothesen, Teilprothesen, Zahnspangen und Beißschienen.

Produktbeschreibung:

Premier® Pro Clean™ wurde für die Entfernung von Zahnstein und die Reinigung von Flecken von Prothesen, Brücken und kieferorthopädischen Apparaturen zu Hause oder in der Praxis entwickelt.

Kontraindikationen:

Premier® Pro Clean™ unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:

- Empfindliches Zahnfleisch oder offene Wunden

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vollprothesen, Teilprothesen, Zahnspangen und Beißschienen nach dem Einweichen in Pro Clean gründlich abspülen
- Packungen mit Einzeldosis für den Einmalgebrauch.
- Beschädigte Packungen nicht verwenden.
- Produkt immer in der Original-Schutzverpackung aufbewahren.
- Überverdünnung vermeiden.
- Exponierte Haut und Hände nach Anwendung gründlich waschen.
- Enthält Sulfaminsäure, die Augen- und Hautreizungen verursachen kann.

WARNHINWEISE:

- Bei nicht vollständigem Abspülen können Reizungen auftreten.
- Bei Exposition Kontaktlinsen herausnehmen.
- AUGEN – 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- HAUT – Mit reichlich Wasser spülen.
- VERSCHLUCKEN – Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Unerwünschte Ereignisse:

- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Mäßig starkes Augen- und Hautreizmittel.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Art.-Nr.	Produkt/Gerät
9011102	Pro Clean STAIN CLEANER (10er-KARTON)
9011103	Pro Clean STAIN CLEANER (EINZELPACKUNG)
9011992	Pro Clean PROBE (1 Pkg.)

Materialien:

Sulfamidsäure in kristalliner Form mit frischem Minzeduft.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

In der Praxis:

- Inhalt der Packung in einen Becher oder einen verschließbaren Plastikbeutel mit 16 Unzen (473 ml) sehr warmem (100-125 °F/38-52 °C) Wasser geben.
- Becher oder verschlossenen Plastikbeutel je nach Intensität des Flecks für 1-5 Minuten in das Ultraschallbad eintauchen.
- Nach der Reinigung gründlich mit Leitungswasser abspülen, um Rückstände des Reinigungsmittels von der Vorrichtung zu entfernen.

Zuhause:

- Inhalt der Packung in einen Behälter mit 16 Unzen (473 ml) sehr warmem (100-125 °F/38-52 °C) Wasser geben.
- Vorrichtung mindestens zwei (2) Stunden lang einweichen lassen.
- Nach der Reinigung gründlich mit Leitungswasser abspülen, um Rückstände des Reinigungsmittels von der Vorrichtung zu entfernen.

Pro Reinigung ein Päckchen verwenden.

Lagerung:

Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit:








Das Produkt hat kein Verfallsdatum.

Entsorgung:

Nach der Verwendung sollte das Produkt als biogefährlicher medizinischer Abfall entsprechend den Richtlinien/Verfahren der Einrichtung oder Institution entsorgt werden.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Hersteller
	Chargennummer
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	Kühl und trocken lagern
	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
	Medizinprodukt
	UKCA