

# Pro Clean™

Eliminador profesional de sarro y manchas para dentaduras postizas, dentaduras parciales, retenedores y protectores nocturnos



**premier®** Inspired solutions  
for daily dentistry®



Fabricante:

Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive,  
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.  
888-670-6100 • 610-239-6000

[premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) • Fabricado en EE. UU.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 4-1  
30175 Hannover, Germany



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

Instrucciones de uso  
n.º 90112-2 0421094 Rev0 PDF

**Uso previsto:**

Está destinado a ayudar a eliminar el sarro y las manchas de las dentaduras postizas, dentaduras parciales, retenedores y protectores nocturnos.

**Descripción del dispositivo:**

Premier® Pro Clean™ está formulado para la limpieza en casa o en la consulta del sarro y las manchas de las dentaduras postizas, puentes y aparatos de ortodoncia.

**Contraindicaciones:**

No utilice Pro Clean™ en las siguientes condiciones:

- Sensibilidad en las encías o heridas abiertas

**PRECAUCIONES:**

- Enjuague a fondo las dentaduras postizas, dentaduras parciales, los retenedores y los protectores nocturnos después de sumergirlos en Pro Clean
- Paquetes unitarios de un solo uso.
- No utilice el envase si lo encuentra dañado.
- Guarde siempre el producto en su envase protector original.
- Evite la dilución excesiva.
- Lávese bien la piel y las manos después de la manipulación.
- Contiene ácido sulfámico, que puede causar irritación de los ojos y la piel.

**ADVERTENCIAS:**

- Si no se enjuaga completamente, puede producirse irritación.
- Quítese las lentes de contacto, en caso de exposición.
- OJOS – Aclare con gran cantidad de agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
- PIEL – Aclare con gran cantidad de agua.
- INGESTIÓN – Beba gran cantidad de agua. Contacte con el médico rápidamente.

**Acontecimientos adversos:**

- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en caso de inhalación.
- Irritante moderado para los ojos y la piel.

Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

**Contenido y disposición:**

Número de artículo	Producto/dispositivo
9011102	LIMPIADOR DE MANCHAS Pro Clean (CAJA DE 10)
9011103	LIMPIADOR DE MANCHAS Pro Clean (CAJA INDIVIDUAL)
9011992	MUESTRA Pro Clean (paquete de 1)

**Materiales:**

Fórmula cristalina de ácido sulfámico con fresco aroma a menta.

**INDICACIONES DE USO:****En la consulta:**

- Añada el contenido del paquete a un recipiente o una bolsa de plástico resellable con 0,5 l de agua muy caliente (38-52 °C).
- Sumerja el recipiente o la bolsa de plástico sellada en un baño ultrasónico durante 1-5 minutos, dependiendo del volumen de la mancha.
- Aclare a fondo con agua del grifo después de la limpieza para eliminar los restos de limpiador del aparato.

**En casa:**

- Añada el contenido del paquete a un recipiente con 0,5 l de agua muy caliente (38-52 °C).
- Deje el aparato en remojo durante al menos dos (2) horas.
- Aclare a fondo con agua del grifo después de la limpieza para eliminar los restos de limpiador del aparato.

Utilice un paquete por limpieza.

**Almacenamiento:**

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

**Duración:**

El producto no tiene fecha de caducidad.

**Eliminación:**

Después del uso, elimine como un residuo médico biopeligroso de acuerdo con las directrices/procedimientos del centro o la institución.

**Para más información:**

Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) o llame a Premier al 610-239-6000.

Símbolos	Significado del símbolo
	Fabricante
	Número de lote
	Advertencia; consulte las instrucciones de uso
	Almacene en sitio fresco y seco
	Evite la luz solar directa
	Producto sanitario
	UKCA