

Pro Clean™

Détartrant et détachant professionnel pour les prothèses, prothèses partielles, appareils de rétention et attelles nocturnes



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Fabricant:

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 É.-U.
888 670-6100 • 610 239-6000

premierdentalco.com • Fabriqué aux États-Unis



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

IFU# 90112-2 0421094 Rev0 PDF

Utilisation prévue :

Le produit est prévu pour aider à l'élimination du tartre et des taches sur les prothèses, prothèses partielles, appareils de rétention et attelles nocturnes.

Description du produit :

Premier® Pro Clean™ est formulé pour un nettoyage à domicile ou en cabinet du tartre et des taches sur les prothèses, ponts et appareils orthodontiques.

Contre-indications :

Ne pas utiliser Pro Clean™ lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- Sensibilité des gencives ou présence de plaies ouvertes.

PRÉCAUTIONS :

- Rincer soigneusement les prothèses, prothèses partielles, appareils de rétention et attelles nocturnes après le trempage dans Pro Clean.
- Emballages unitaires à usage unique.
- Ne pas utiliser l'emballage s'il est endommagé.
- Toujours conserver le produit dans son emballage protecteur d'origine.
- Éviter une dilution excessive.
- Laver la peau exposée et les mains soigneusement après la manipulation.
- Contient de l'acide sulfamique, qui peut provoquer une irritation des yeux et de la peau.

AVERTISSEMENTS :

- Une irritation peut se produire si le produit n'est pas complètement rincé.
- Enlever les lentilles de contact en cas d'exposition.
- YEUX – Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- PEAU – Rincer à grande eau.
- INGESTION – Boire beaucoup d'eau. Consulter rapidement un médecin.

Effets indésirables :

- Peut être nocif en cas d'ingestion.
- Peut être nocif en cas d'inhalation.
- Irritant modéré des yeux et de la peau.

Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant ou à une autorité compétente dans l'État membre où le produit a été utilisé.

Contenu et mise en place :

N° d'article	Produit
9011102	DÉTACHANT Pro Clean (CAISSE DE 10)
9011103	DÉTACHANT Pro Clean (BOÎTE UNIQUE)
9011992	ÉCHANTILLON Pro Clean (1 emballage)

Contenu :

Formule à base d'acide sulfamique sous forme cristalline, possède une odeur de menthe fraîche.

MODE D'EMPLOI :

En cabinet :

- Ajouter le contenu de l'emballage dans un bécber ou un sac de plastique refermable contenant 473 ml (16 oz liq.) d'eau très chaude (38 à 52 °C/100 à 125 °F).
- Immerger le bécber ou le sac de plastique scellé dans le bain ultrasonique pendant 1 à 5 minutes, selon l'intensité de la tache.
- Après le nettoyage, rincer soigneusement à l'eau du robinet pour éliminer les résidus de produit nettoyant sur le dispositif.

À domicile :

- Ajouter le contenu de l'emballage dans un contenant avec 473 ml (16 oz liq.) d'eau très chaude (38 à 52 °C/100 à 125 °F).
- Laisser le dispositif tremper pendant au moins deux (2) heures.
- Après le nettoyage, rincer soigneusement à l'eau du robinet pour éliminer les résidus de produit nettoyant sur le dispositif.

Utiliser un emballage par nettoyage.

Entreposage :

Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Durée de conservation :








Le produit n'a pas de durée de conservation.

Élimination :

Après l'utilisation, éliminer la solution en tant que déchet médical biologiquement dangereux, conformément aux lignes directrices ou aux procédures des installations ou de l'institution.

Pour plus d'information :

Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d'emploi, visiter le site premierdentalco.com ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.

Symboles	Signification du symbole
	Fabricant
	Numéro de lot
	Avertissement, voir le mode d'emploi
	Entreposer le produit dans un endroit sec et frais
	Éviter les rayons directs du soleil
	Produit à usage médical
	UKCA