

Vac Attak™ GREEN e Vacu Blast™

Detergenti enzimatici per sistema di evacuazione



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Produttore:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com • Fabbricato negli USA



premierdentalco.com/promise

Istruzioni per l'uso
91115-2_0421096 Rev0 PDF

Uso previsto:

Vac Attak™ GREEN e Vacu Blast™ sono detergenti enzimatici per sistema di evacuazione ad alte prestazioni sicuri da utilizzare con tutti i separatori amalgama.

Descrizione del dispositivo:

Premier® Vac Attak™ GREEN e Vacu Blast sono detergenti enzimatici per sistema di evacuazione ad alte prestazioni sicuri da utilizzare nelle pratiche dentali. Vac Attak™ GREEN è fornito sotto forma di polvere, mentre Vacu Blast è in forma liquida.

Controindicazioni:

Non utilizzare Vac Attak™ GREEN/Vacu Blast™ nelle seguenti condizioni:

- Se il contenitore o il tappo è rotto/danneggiato.
- Non utilizzare su strumenti in alluminio anodizzato.

PRECAUZIONI:

- Non miscelare con altri detergenti e contaminanti.
- Evitare l'eccessiva diluizione.
- Conservare il prodotto solo nel contenitore originale.
- Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso.
- Non inserire cucchiai umidi nel contenitore.
- Lavare a fondo la pelle esposta e le mani dopo la manipolazione.

AVVERTENZE:

- In caso di esposizione, rimuovere le lenti a contatto.
- **OCCHI:** sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti in caso di esposizione. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.
- **CUTE:** sciacquare abbondantemente con acqua.
- **INGESTIONE:** bere molta acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Eventi avversi:

- IN CASO DI INGESTIONE:
 - » Nocivo, può causare nausea e vomito.
 - » Può essere irritante per bocca e gola.
 - » Può causare reazioni di tipo allergico.
- Può causare irritazione cutanea, danni oculari e reazioni allergiche cutanee.

Se si verifica un incidente grave in relazione al dispositivo, segnalarlo al fabbricante e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è stato utilizzato.

Contenuto e preparazione:

N. articolo	Specifiche del prodotto	N. articolo	Specifiche del prodotto
9011995	CAMPIONE di Vac Attak GREEN (1 confezione)	9011107	Vacu Blast (scatola da 12)
9011105	Vac Attak GREEN (SCATOLA DA 6)	9011109	Vacu Blast (singolo flacone)
8101105	Vac Attak GREEN singolo barattolo	8101107	Campione di Vacu Blast

Materiali:

Vac Attak Green - Potente formula enzimatica conforme a EPA, all'aroma fresco di agrumi

Vacu Blast - Potente detergente enzimatico senza fosfati e cloro, all'aroma di eucalipto

ISTRUZIONI PER L'USO:

Vac Attak™ Green	Vacu Blast™
<ol style="list-style-type: none">1. Riempire il pozzetto di evacuazione o un altro contenitore con 32 onces (946 ml) di acqua di rubinetto calda.2. Prelevare dal contenitore un cucchiaino (8 g) di detergente in polvere.3. Spargere la polvere sull'acqua, lasciando che si sciolga completamente (30-45 secondi).4. Sciacquare il sistema con la soluzione.5. Una volta pulito, sciacquare nuovamente il sistema con acqua corrente.	<ol style="list-style-type: none">1. Allentare il tappo della camera dosatrice (NON RIMUOVERLO).2. Comprimerne dal centro della bottiglia fino a quando il liquido non raggiunge il segno di ½ oz (14,78 ml).3. Rimuovere il tappo dalla camera dosatrice e versare il contenuto in 946 ml di acqua.4. Mescolare a fondo prima dell'uso. <ul style="list-style-type: none">• Per grandi ambulatori, comprimerne dal centro della bottiglia fino a quando il liquido non raggiunge il segno 1 oz (29,57 ml).• Si raccomanda di diluire 1 oncia (29,57 ml) di prodotto (Vacu Blast) con 1.892 ml di acqua.
Attenzione: <ul style="list-style-type: none">• La prima volta che viene utilizzato, grazie alla sua efficace azione detergente, Vac Attak GREEN potrebbe determinare il distacco di detriti accumulati nel tempo. Per garantire la massima efficienza, controllare il filtro/la trappola dopo l'uso.• Ideale per rimuovere tutti i tipi di residui organici.• Utilizzare ogni giorno una nuova soluzione.	

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Periodo di conservazione:

Vac Attak™ Green non ha un periodo di conservazione. Vacu Blast™ ha un periodo di conservazione di tre (3) anni dalla data di produzione.

Smaltimento:

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto medico a rischio biologico in conformità alle linee guida/procedure della struttura o dell'istituto.

Per ulteriori informazioni:

Per consultare la scheda di dati di sicurezza o le istruzioni per l'uso, visitare il sito premierdentalco.com oppure chiamare Premier al numero 610-239-6000.

Simboli	Significato del simbolo
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Avvertenza, vedere le Istruzioni per l'uso
	Conservare in un luogo fresco e asciutto
	Evitare la luce solare diretta
	Dispositivo medico
	UKCA