



Vac Attak™

Hochleistungsreiniger für Absaugsysteme



premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Hersteller:

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000

premierdentalco.com · Hergestellt in den USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30173 Hannover, Germany



premierdentalco.com/promise

IFU# 90119-2 0421095 Rev5 PDF

Vorgesehene Verwendung:

VacAttak ist ein chlorhaltiger, nicht schäumender Hochleistungsreiniger für Absaugsysteme, der keine korrosive Wirkung auf Metalle ausübt und sicher für alle Pumpen verwendet werden kann.

Produktbeschreibung:

Premier® VacAttak™ ist ein ein chlorhaltiger Hochleistungsreiniger für in Zahnarztpraxen verwendete Absaugsysteme. VacAttak™ ist in Pulverform erhältlich.

Kontraindikationen:

VacAttak™ unter den folgenden Bedingungen nicht verwenden:

- Behälter oder Deckel zerbrochen oder beschädigt.
- Nicht für Instrumente aus eloxiertem Aluminium verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Fremdstoffen mischen.
- Überverdünnung vermeiden.
- Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Behälter bei Nichtbenutzung fest verschlossen halten.
- Keinen nassen Dosierlöffel in Behälter platzieren.
- Exponierte Haut und Hände nach Anwendung gründlich waschen.

WARNHINWEISE:

- Bei Exposition Kontaktlinsen herausnehmen.
- AUGEN – bei Exposition 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Falls die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- HAUT – Mit reichlich Wasser spülen.
- VERSCHLUCKEN – Reichlich Wasser trinken. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Unerwünschte Ereignisse:

- BEI VERSCHLUCKEN –
 - »Schädlich, kann Übelkeit und Erbrechen verursachen.
 - »Kann Reizungen im Mund- und Rachenraum verursachen.
 - »Kann allergische Reaktionen verursachen.
- Kann Hautreizungen, Augenschäden und allergische Hautreaktionen verursachen.

Sollte ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, melden Sie diesen Vorfall bitte dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem das Produkt verwendet wurde.

Inhalt und Lieferumfang:

Art.-Nr.	Produktspezifikationen
9011998	VacAttak 10er-Packung
9011101	VacAttak (6er-KARTON)
8101111	VacAttak Einzelglas
9011999	VacAttak PROBE (1 Pkg.)
9011912	VacAttak Probe INTL mit Abbildungskarte

Materialien:

VacAttak – kraftvoller organischer Chlorreiniger mit frischem Zitronenduft.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Absaugbecken oder anderen Behälter mit 32 Unzen (946 ml) warmem Leitungswasser füllen.
- Einen Messlöffel (8 g) Reinigungspulver aus dem Behälter entnehmen.
- Das Pulver in das Wasser streuen und vollständig auflösen lassen (30-45 Sekunden).
- Das System mit der Lösung spülen.
- Nach der Reinigung das System erneut mit Leitungswasser spülen.

Achtung:

Bei der erstmaligen Verwendung können sich aufgrund der starken Reinigungswirkung von VacAttak angesammelte Schmutzreste lösen. Zur Aufrechterhaltung der maximalen Leistung sollte deshalb der Filter/Auffangbehälter nach der Nutzung überprüft werden.

- Entfernt alle Arten von organischen Schmutzresten extrem effektiv.
- Täglich eine neue Lösung verwenden.

Lagerung:

Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit:








Das Produkt hat kein Verfallsdatum.

Entsorgung:

Nach der Verwendung sollte das Produkt als biogefährlicher medizinischer Abfall entsprechend den Richtlinien/Verfahren der Einrichtung oder Institution entsorgt werden.

Für weitere Informationen:

Das SDB oder die Gebrauchsanweisung erhalten Sie unter www.premierdentalco.com oder telefonisch bei Premier unter +1-610-239-6000.

Symbole	Symbolbedeutung
	Hersteller
	Chargennummer
	Warnung, siehe Gebrauchsanweisung
	Kühl und trocken lagern
	Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
	Medizinprodukt
	UKCA