



# VacAttak™

Limpiador del sistema de evacuación de alto rendimiento



**premier**® Inspired solutions  
for daily dentistry®



Fabricante:  
Premier® Dental Products Company  
1710 Romano Drive,  
Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU.  
888-670-6100 • 610-239-6000  
premierdentalco.com • Fabricado en EE. UU.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



[premierdentalco.com/promise](http://premierdentalco.com/promise)

Instrucciones de uso  
n.º 90119-2 0421095 Rev5 PDF

### Uso previsto:

VacAttak es un limpiador clorado de alto rendimiento para sistemas de evacuación, que no hace espuma, no es corrosivo para los metales y es seguro para su uso con todas las bombas.

### Descripción del dispositivo:

Premier® VacAttak™ es un limpiador clorado para el sistema de evacuación de alto rendimiento que se utiliza en las consultas dentales. VacAttak™ está disponible en forma de polvo.

### Contraindicaciones:

No utilice VacAttak™ en las siguientes condiciones:

- Si el envase o la tapa se encuentran rotos/dañados.
- No debe utilizarse en instrumentos de aluminio anodizado

### PRECAUCIONES:

- No lo mezcle con otros detergentes o contaminantes.
- Evite la dilución excesiva.
- Mantenga el producto almacenado solo en el envase original.
- Mantenga los recipientes herméticamente cerrados cuando no se utilicen.
- No coloque una cuchara húmeda en el recipiente.
- Lávese bien la piel y las manos después de la manipulación.

### ADVERTENCIAS:

- Quítense las lentes de contacto, en caso de exposición.
- OJOS – Aclare con gran cantidad de agua durante 15 minutos en caso de exposición. Si la irritación persiste, busque atención médica.
- PIEL – Aclare con gran cantidad de agua.
- INGESTIÓN – Beba gran cantidad de agua. Contacte con el médico rápidamente.

### Acontecimientos adversos:

- EN CASO DE INGESTIÓN:
    - » Nocivo, puede provocar náuseas y vómitos.
    - » Puede ser irritante para la boca y la garganta.
    - » Puede provocar una reacción de tipo alérgico.
  - Puede causar irritación cutánea, lesiones oculares y reacciones cutáneas alérgicas.
- Si ha ocurrido un incidente grave relacionado con el producto, informe acerca de él al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro donde se haya utilizado.

### Contenido y disposición:

Número de artículo	Especificaciones del producto
9011998	VacAttak, paquete de 10
9011101	VacAttak (CAJA DE 6)
8101111	VacAttak, frasco individual
9011999	VacAttak, MUESTRA (paquete de 1)
9011912	VacAttak, Muestra INTL con tarjeta de ilustración

### Materiales:

VacAttak – Potente fórmula con cloro orgánico y con un fresco aroma a limón.

### INDICACIONES DE USO:

- Llene la pila de evacuación u otro recipiente con aproximadamente 1 l de agua caliente del grifo.
- Saque una cucharada (8 g) de polvo limpiador del envase.
- Espolvoree el polvo en el agua y deje que se disuelva completamente durante 30-45 segundos.
- Enjuague el sistema con la solución.
- Enjuague el sistema una vez más con agua del grifo después de la limpieza.

### Atención:

Tras el uso inicial, la potente acción de limpieza de VacAttak puede hacer que se desprendan los residuos acumulados. Asegúrese de comprobar el filtro/sifón después de su uso para obtener la máxima eficacia.

- Muy eficaz para eliminar todo tipo de restos orgánicos.
- Utilice diariamente una solución nueva.

### Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

### Duración:








El producto no tiene fecha de caducidad.

### Eliminación:

Después del uso, elimine como un residuo médico biopeligroso de acuerdo con las directrices/procedimientos del centro o la institución.

### Para más información:

Para obtener la FDS (ficha de datos de seguridad) o las instrucciones de uso, visite [premierdentalco.com](http://premierdentalco.com) o llame a Premier al 610-239-6000.

Símbolos	Significado del símbolo
	Fabricante
	Número de lote
	Advertencia; consulte las instrucciones de uso
	Almacene en sitio fresco y seco
	Evite la luz solar directa
	Producto sanitario
	UKCA