

Priva Rotary Instruments™

Diamond Burs

Dispositivos: Priva Rotary Instruments™ Fresas De Diamante

ADVERTENCIAS

Generales

1. Seque los dispositivos a conciencia después de todos los pasos, si van a transcurrir más de 15 minutos antes del siguiente paso.
2. Todas las soluciones utilizadas deben ser compatibles con las fresas dentales de acero inoxidable (las soluciones alcalinas, ácidas o aldehídicas pueden causar daños).
3. Siga todas las instrucciones aplicables del fabricante de la solución o el equipo.
4. Todos los equipos y soluciones aplicables deben cumplir los requisitos normativos nacionales.
5. **Estos dispositivos NO se suministran estériles.**
Deben limpiarse y esterilizarse antes del uso, del modo siguiente.

Limitaciones de procesamiento

Ninguna, salvo el desgaste del diamante, que debe valorar el usuario.

INSTRUCCIONES

Tratamiento inicial en el punto de uso

Reprocese los dispositivos tan pronto como sea posible después de usarlos. No deje que el material impregnado se seque. Mantenga los dispositivos sumergidos en solución desde que los use hasta que los limpie; utilice un limpiador enzimático, limpieza/desinfección, limpieza o agua (por orden de preferencia).

Preparación previa a la limpieza No aplicable

Limpieza: Automatizada

1. Enjuague los dispositivos bajo un chorro potente de agua corriente.
2. Limpie los dispositivos por ultrasonidos en un limpiador enzimático (Limpiador ultrasónico e impregnación estática enzimática Premier Brite Shield™ o equivalente, disuelto en agua corriente) durante al menos cinco minutos. Evite que los dispositivos entren en contacto entre sí durante la limpieza (no los apile).
3. Enjuague abundantemente con agua corriente.

Limpieza: Manual No aplicable

Desinfección No aplicable

Secado

Para secar, utilice paños absorbentes desechables, calor seco o aire presurizado filtrado. Si los dispositivos no quedan completamente secos, pueden corroerse.

Mantenimiento, inspección y prueba

Compruebe visualmente que los dispositivos no están contaminados. Se recomienda utilizar una lupa. **Repita los pasos anteriores si hay dispositivos que aún estén contaminados.**

Empaquetado Bolsa de esterilización

Esterilización

Esterilice al vapor en prevacío, con una presión media de 30 PSI (207 kPa), durante un mínimo de 4 minutos a 132 °C, con un tiempo de secado mínimo de 22 minutos.

Almacenamiento

Almacene los dispositivos en el envoltorio esterilizado.

Información adicional

La superficie puede decolorarse o perder brillo tras la esterilización habitual con calor húmedo. Estas variaciones no afectan al rendimiento.

Contacto del fabricante: +1 740-548-4100

Las instrucciones anteriores han sido validadas por el fabricante del dispositivo médico como aptas para preparar un dispositivo médico para su uso/re-utilización. Es responsabilidad del procesador garantizar que el procesamiento efectivamente realizado con los equipos, materiales y trabajadores de la instalación procesadora alcanza el resultado deseado. Ello requiere verificar y/o validar el proceso y comprobarlo periódicamente.

Fecha de publicación: 1/2022

Diseñado y fabricado por:



Distribuido por:

Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
(888) 670-6100 • (610) 239-6000 • premierdentalco.com



premierdentalco.com/promise

IFU# 30074 • 1025055 Rev0 PDF